

## INSTRUÇÃO DE USO: DAPF

**DAP / Solução de Hexafluorine®**

**Solução de lavagem de emergência para projeções de ácido hidrófluorídrico e seus derivados fluorados ácidos na pele.**

Você adquiriu uma Ducha Autônoma Portátil (DAP) de solução Hexafluorine®, agradecemos por sua confiança em nossos produtos.

**O QUE É A DAPF ?**

A DAPF é uma ducha autônoma portátil contendo 5 litros da solução de Hexafluorine®. É designada para a lavagem de projeções de ácido hidrófluorídrico e seus derivados fluorados ácidos sobre o corpo e deve ser utilizada no primeiro minuto.

**INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA DAPF:**

Devido ao conteúdo de 5 litros da solução de Hexafluorine®, a DAPF permite a lavagem de superfícies cutâneas dentro dos primeiros 60 segundos após um acidente químico.

**Portanto, a DAPF deve ser colocada perto de áreas de risco de projeções de ácido hidrófluorídrico e seus derivados fluorados ácidos. Pode ser transportada por funcionários que se deslocam de um lugar de risco para outro.**

**PROTOCOLO RECOMENDADO PARA A MÁXIMA EFICÁCIA:**

A DAPF é designada como descontaminação emergencial primária de toda a superfície corpórea.

A eficácia do DAPF vem das propriedades ativas da solução de Hexafluorine®. Durante um acidente é recomendado o uso de todo o conteúdo da solução. A vítima da projeção deve ser despida completamente a fim de não aumentar o tempo de contato da pele com o produto químico.

**Recomendações Gerais**

A DAPF deve ser utilizada como solução primária e como primeira resposta. Uma lavagem preliminar com água leva a um atraso na aplicação e conseqüentemente uma diminuição da eficácia da solução de Hexafluorine®. Se a solução de Hexafluorine® não estiver disponível no momento, utilizar água, mas nunca atrasar a lavagem. Não exceder o prazo de validade indicado na embalagem. A DAPF é um dispositivo para apenas uma única utilização. Este dispositivo destina-se a garantir que todo o conteúdo da DAPF seja utilizado no caso de uma projeção corpórea.

**Âmbito de eficácia e limitações da solução de Hexafluorine®**

A solução de Hexafluorine® interrompe a penetração de ácido hidrófluorídrico e seus derivados ácidos impedindo o desenvolvimento de lesões químicas; caso exista um risco diversificado com outras substâncias (bases, ácidos, óxido-redutores e solventes), recomenda-se utilizar a solução de Diphoterine®, uma solução de lavagem polivalente

para todos os tipos de projeções de produtos químicos.

**O que fazer se a lesão já se desenvolveu, ou se a intervenção ocorrer após 60 segundos?**

Após 60 segundos, a lesão já pode estar desenvolvida. A lavagem com solução de Hexafluorine®, incluindo na lesão já desenvolvida, irá contribuir na implementação de cuidado secundário. Há indicações de que a solução apresenta benefício, mesmo na lavagem com retardo (após 60 segundos). Neste caso, recomenda-se usar a DAP de Hexafluorine® como lavagem secundária com uma duração ideal de 3 a 5 vezes o tempo de contato com o produto químico. A partir daí, a aplicação de gluconato de cálcio sobre a zona contaminada pode ser indicado de acordo com o protocolo estabelecido pelo médico encarregado.

**Conservação e manutenção**

A DAPF não exige armazenamento especial. No entanto, é recomendado não expor o produto a temperaturas congelantes, porque a solução pode congelar e por isso não estará na condição de uso imediato. Entretanto, ao descongelamento, não haverá perda de eficácia da solução de Hexafluorine®. A faixa de temperatura ideal em que o produto deve ser utilizado é 15 e 35 ° C. A DAPF deve ser substituída na data de expiração indicado no rótulo ou antes dela.

**Toxicologia**

A solução de Hexafluorine® é não irritante, não alergênica e não tóxica.



Fabricado por:  
Prevor – F95 – Valmondois – França – [www.prevor.com](http://www.prevor.com)  
Distribuído no Brasil por:  
Globaltek Ltda  
Rua Ilhéus, 268, Rio Vermelho – Salvador – BA. CEP: 41940-570.  
Tel: (71) 3334-5556 – [www.globaltek.com.br](http://www.globaltek.com.br) – [globaltek@globaltek.com.br](mailto:globaltek@globaltek.com.br)  
Resp.Técnico: Mário G.K. Monteiro – CRQ 07100002  
Reg. ANVISA nº: 80260810002

**03905063/0001-85**

**GLOBALTEK  
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Rua Ilhéus, nº 268 - Rio Vermelho  
CEP 41940-570

SALVADOR - BA

**Mário Gilberto Kool Monteiro  
Responsável Técnico  
CRQ-BA 07100002 - 7.ª Região**